

# Gairomat PLUS<sup>®</sup>


NON-ENERGETISCHE  
DRUCKENTLASTUNG ZUR  
DEKUBITUSPROPHYLAXE  
UND -THERAPIE  
MITTLERES BIS HOHES  
DEKUBITUSRISIKO

OPTIMALE PATIENTEN-  
VERSORGUNG BEI  
RESTMOBILITÄT UND  
SCHMERZMANAGEMENT



## SICHERE VERSORGUNG – WARTUNGSARM, PATIENTEN- UND BEDIENERFREUNDLICH

- Bedienerfreundlich und wartungsarm zur Druckentlastung von Risikozonen
- Hervorragender Liegekomfort durch 4 cm dicke viskoelastische Schicht
- Automatische Druckeinstellung auf das Patientengewicht
- Die abgeschrägte Fersenzone bietet eine gezielte Druckentlastung
- Trageschlaufen zum einfachen Handling des Matratzenkörpers
- Fixiergurte zur Befestigung des Matratzenkörpers am Patientenbett
- Atmungsaktiver, bi-elastischer Nässeschutz-Bezug gewährt hohe Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit
- Umlaufender verdeckter Reißverschluss

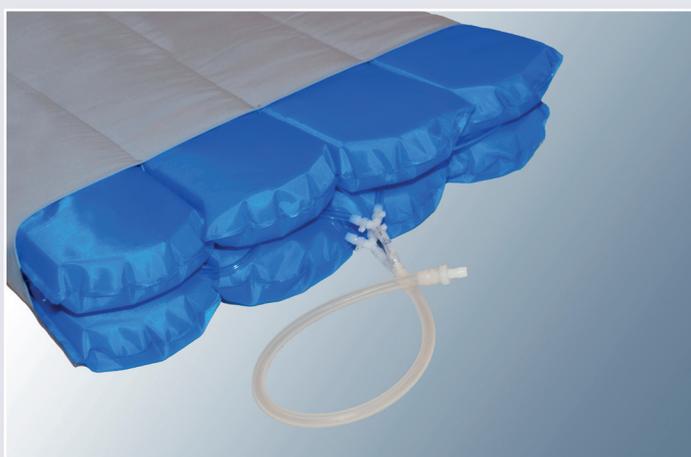

### WIRKPRINZIP:

Ein kreuzlaufendes Schlauchsystem zwischen den 4 Kammern der oberen Lage und den 4 Kammern der unteren Lage sorgt für eine optimale Druckverteilung in den Kammern untereinander.

Die innenliegenden Kammern enthalten Schaumstoff, um die druckentlastende Wirkung des Systems jederzeit zu gewährleisten.

## TECHNISCHE DATEN



Matratze	
Abmessungen	200 x 86 x 17 cm (LxBxH)
Patientengewicht	bis 300 kg
Aufbau	8 Luftzellen kombiniert mit Schaumstoff
Obere Lage / Liegefläche	4 cm viskoelastischer Schaum
Matratzenkorpus	Hochwertige Kaltschäume
Material Bezug	Polyurethan, Latex-frei
Oberseite	Bi-elastischer, atmungsaktiver Inkontinenzbezug
Unterseite	Nylongewebe mit PU-Beschichtung mit wasserabweisender Imprägnierung
Reinigung	Bezug waschbar bis 85 °C, Wischdesinfektion mit DGHM gelisteten* chlorfreien Reinigungs- und Desinfektionsmitteln *Reinigungsanweisung über GerroMed erhältlich

© 2014 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelsmarken und Trademarks (TM) sind Eigentum von GerroMed und deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen.  
Stand der Informationen: November 2014

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO13485



DB/CP/02-15

**GerroMed**

GerroMed Pflege und Medizintechnik GmbH

Papenreye 55 · D - 22453 Hamburg · Telefon 040 / 54 73 03-0 · Fax 040 / 54 73 03-33 · www.gerromed.de · mail@gerromed.de